


BRAUN


Безконтактный термометр Braun



BNT 400

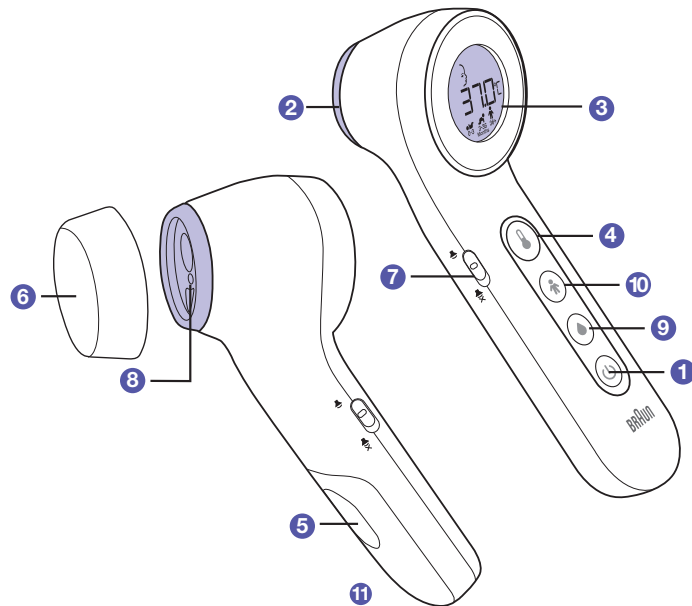

Цей продукт виробляється за ліцензією торгової марки «Braun». «Braun» є зареєстрованою торговою маркою компанії Braun GmbH, Кронберг, Німеччина. Age Precision® є зареєстрованою торговою маркою Helen of Troy Limited.

 Kaz Europe Sàrl
Place Chauderon 18
CH-1003 Лозанна
Швейцарія



© 2018 Усі права захищено
www.hot-europe.com
Патенти: www.kaz.com/patents/
braun



Зроблено в Китаї

BNT400WE
A002034R1
15.05.18

Дякуємо за придбання безконтактного сенсорного термометра (BNT400). Цей термометр є високоякісним виробом, що включає новітні технології яких перевірено відповідно до міжнародних стандартів. Завдяки своїй унікальній технології пристрій може забезпечити стабільне, точне зчитування температури під час кожного вимірювання. Термометр виконує самоперевірку кожного разу, коли його викають, щоб завжди гарантувати точність вимірювань.

Безконтактний термометр Braun призначений для періодичного визначення температури тіла людини у людей будь-якого віку в режимі «Дитини» і «Без дотику» з використанням центру чола як місця вимірювання в домашніх умовах. Перед використанням приладу уважно прочитайте інструкції та зберігайте їх та термометр у безпечному місці.

Опис приладу (див. сторінку 1)

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Кнопка живлення 2. Сканер 3. РК-екран 4. Кнопка вимірювання температури 5. Кришка відсіку для акумуляторів 6. Захисний ковпачок сканера 7. Перемикач беззвучного режиму | <ol style="list-style-type: none"> 8. Світловий індикатор 9. Функція вимірювання температури їжі/ванни. 10. Кнопка Age Precision® 11. Перемикач між градусами за Фаренгейтом та Цельсієм (всередині батарейного відсіку) |
|--|--|



Важливі вказівки з техніки безпеки

Зберігайте прилад в недоступному для дітей місці до 12 років.

- **НИКОЛИ** не використовуйте термометр для цілей, відмінних від тих, для яких він був призначений.
- Будь ласка, дотримуйтеся загальних заходів безпеки під час використання приладу дітьми або для дітей.
- Ніколи не занурюйте термометр у воду чи інші рідини.
- Для очищення та дезінфекції приладу дотримуйтеся інструкцій у розділі «Догляд та очищення».
- Не зберігайте термометр при екстремальних температурах нижче -25 °C або вище 55 °C (нижче -13 °F або вище 131 °F) або в умовах надмірної вологості (вище 95% відносної вологості без конденсації).
- Якщо термометр зберігається в місці, яке прохолодніше або тепліше, ніж те, де він буде використовуватися, дайте йому акліматизуватися до кімнатної температури протягом 10 хвилин перед вимірюванням.
- Не використовуйте термометр, якщо на сканері або на самому термометрі є ознаки пошкодження.
- Якщо виріб пошкоджено, не намагайтеся відремонтувати його.
- Ніколи не вставляйте гострих предметів у область сканера чи будь-яку іншу відкриту поверхню термометра.
- Цей термометр складається з високоякісних точних деталей.
- Не кидайте прилад.
- Захищайте прилад від сильних ударів.
- Не розкручуйте прилад або вимірювальний датчик.
- Цей термометр призначений лише для домашнього використання.
- Використання цього термометра не являється заміною консультації з вашим лікарем.
- Підвищення температури може свідчити про серйозне захворювання, особливо у новонароджених і немовлят, а також у літніх, немічних або з ослабленою імунною системою дорослих. негайно зверніться до фахівця, якщо піднялася температура у осіб, які:
 - Новонароджені та немовлята віком до 3 місяців (негайно зверніться до лікаря, якщо температура перевищує 37,4 °C [99,4 °F])

- Особи старше 60 років (лихоманка може бути притупленою або взагалі відсутній у літніх людей)
- Особи з цукровим діабетом або ослабленою імунною системою (наприклад, ВІЛ-інфіковані, хіміотерапія раку, хронічне лікування імунодепресантами, спленектомія)
- Особи, які прикуті до ліжка (наприклад, пацієнти в будинку престарілих, інсульт, хронічні захворювання, параліч, квадриплегія, хірургічне відновлення)
- Реципієнт трансплантації (наприклад, печінки, серця, легень, нирок).
- Цей термометр не призначений для недоношених дітей або маленьких дітей. Недоношеними вважаються діти з календарним віком менше 37 тижнів. Малий для гестаційного віку визначається як дитина, народжена на 37 тижні або пізніше, з вагою нижче 10-го процентиля для дітей того ж гестаційного віку.
- Цей термометр не призначений для інтерпретації гіпотермічних температур. Якщо пристрій показує температуру 36,4 °C (97,5 °F) або менше і світлодіодним підсвічуванням зеленого або білого кольору, і людина демонструє нетипові симптоми або поведінку, зверніться до свого лікаря або медичного працівника.
- Не дозволяйте дітям вимірювати температуру без нагляду.
- Зверніться до лікаря, якщо ви помітили такі симптоми, як незрозуміла дратівливість, блювота, діарея, зневоднення, зміни апетиту або активності, судороги, біль у м'язах, тремтіння, ригідність шиї, біль при сечовипусканні тощо, навіть за відсутності лихоманки.
- Навіть за відсутності лихоманки ти, у кого температура нормальна, може знадобитися медична допомога. Людям, які приймають антибіотики, анальгетики або жарознижуючі засоби, не слід оцінювати лише температуру, щоб визначити тяжкість їхнього захворювання.
- Не модифікуйте це обладнання без дозволу виробника.

Переваги безконтактного термометра Braun?

Вимірювання менш ніж за 2 секунди

Інноваційна інфрачервона технологія дозволяє виміряти температуру чола менш ніж за 2 секунди, незалежно від того, чи користуєтесь ви дотиком чи без нього.



Точний і надійний

Завдяки унікальній технології термометр вловлює тепло, яке природним чином виділяє чоло, щоб розрахувати значення температури тіла. Отримує таку ж професійну точність, торкаючись чола вашої дитини чи тримаючи її на відстані до 2,5 см.




Простий у використанні

Даний термометр є неінвазивним. Вимірювання можна проводити навіть під час сну дитини. Вимірювання температури безконтактним термометром безпечніше у використанні для дитини, ніж ректальним термометром, і його легше використовувати, ніж інші прилади.

Безпечний і гігієнічний

Опція без дотику допомагає мінімізувати розповсюдження мікробів. Повністю безпечний для використання дітьми та дорослими.

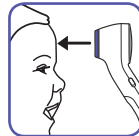

Як працює ваш термометр Braun?

Термометр вимірює інфрачервону енергію, що випромінюється шкірою в центрі. Ця енергія збирається через лінзу та перетворюється на цифровий еквівалент. Бездоганний сенсорний термометр пройшов всі клінічні випробування та підтвердив свою безпечність і точність при використанні його у відповідності до інструкції з експлуатації.

Age Precision® із кольоровим кодуванням

Клінічні дослідження показують, що визначення температури змінюється, коли новонароджені стають дітьми, а діти стають дорослими.¹

• Виберіть відповідне вікове налаштування, виміряйте температуру, і дисплей світлитиметься зеленим, жовтим або червоним, щоб вказати, чи знаходиться температура в межах норми, лихоманки чи високої температури відповідно.

• Прилад призначений виключно для вимірювання температури тіла людини.

• Пристрій також має режим вимірювання температури їжі/ванни.

• Він не призначений для діагностики чи моніторингу серйозних захворювань чи захворювань. Л. Херцог Л., Філліпс С. Вирішуючи питання про лихоманку. Клінічна педіатрія. 2011 рік; 50 (№5): 383-390.

Підказки щодо вимірювання температури

Важливо знати нормальну температуру кожної людини, коли вона почувається добре.

Тільки так можна точно діагностувати лихоманку. Зробіть кілька вимірювань, коли ви здорові, щоб визначити нормальну температуру.

• Нормальна температура у дитини може досягати 37,7 °C (99,9 °F) або 36,1 °C (97,0 °F). Зверніть увагу, що ця одиниця показує на 0,5 °C (0,9 °F) нижчу, ніж ректальне цифрове вимірювання.

• Людина повинна бути всередині приміщення протягом 30 хвилин перед проведенням вимірювання.

Примітка: Термометр і людина повинні знаходитися при однаковій температурі навколишнього середовища принаймні 10 хвилин.

• Завжди тримайте термометр і чоло нерухомо під час вимірювання.

• Не рухайте термометр, поки не почуєте останній звуковий сигнал.

• Не виконуйте вимірювання під час або відразу після годування дитини.

• Люди не повинні пити, їсти або бути фізично активними до/під час вимірювання температури.

• Зніміть капелюх та зачекайте 10 хвилин, перш ніж робити вимірювання.

• Перед вимірюванням видаліть бруд або волосся з області чола.

• Зачекайте 10 хвилин після очищення перед вимірюванням.

• Завжди вимірюйте температуру у відповідності до вказівок.

• Результати температури можуть відрізнятись, якщо розмістити термометр в неправильному місці.

• Людям, які самостійно вимірюють температуру, рекомендується використовувати опцію «дотик» замість опції «без дотику».

• У наступних ситуаціях рекомендується три рази вимірювати температуру в одному місці та брати найвищу з них як показник:

• Новонароджені в перші 100 днів.

• Діти віком до трьох років з ослабленою імунною системою та для яких наявність або відсутність лихоманки є критичним.

• Коли користувач вперше вчиться користуватися термометром, доки він/вона не ознайомиться з приладом і не отримає відповідні показники.


Загальні запобіжні заходи:

- Видаліть будь-який піт з тіла перед вимірюванням сухою тканиною.
- Уникайте будь-яких охолоджуючих або зігріваючих тканин на лобі принаймні за 30 хвилин до вимірювання.
- Не вимірюйте температуру на рубцевій тканині, відкритих ранах або саднах.
- Тримайте датчик вимірювання та лінзу в чистоті. Уникайте прямого дотику до сенсора або об'єктива.
- Завжди зберігайте термометр із захисним ковпачком, щоб уникнути пошкодження пристрою брудом і подряпинами.
- Перед вимірюванням переконайтеся, що знято захисний ковпачок та одягніть ковпачок після використання термометра.

Як користуватися термометром Braun?


Примітка. Термометр та особа повинні перебувати при однаковій температурі навколишнього середовища принаймні 10 хвилин.

1 Зніміть захисний ковпачок.

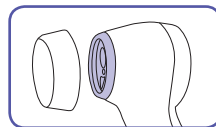



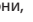
2 Увімкніть живлення

Натисніть і відпустіть кнопку живлення один раз. Увімкнеться підсвічування термометру та розпочнеться послідовний запуск роботи приладу.

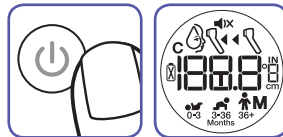

ПРИМІТКА. Перед вимірюванням обов'язково зняти захисну кришку сканера.

3 Оберіть віковий діапазон

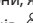
Виберіть вік за допомогою кнопки Age Precision®. Пристрій почне переключатися між віковими діапазонами, підсвічуючи 3 діапазони, які ви можете вибрати; 0-3 місяці , 3-36 місяців  або 36+ місяців .

Натискайте кнопку Age Precision®, щоб перемицати вікові діапазони, доки не виберете відповідний вік для людини.

3.1 Щоб встановити бажаний віковий діапазон: (Блокування налаштування віку)

Щоб зберегти потрібний віковий діапазон, або щоб бажаний віковий діапазон автоматично вибирався, коли термометр увімкнено, виконайте такі дії:

A. Переконайтеся, що термометр вимкнено.

B. Натисніть і утримуйте кнопку живлення  і кнопку Age Precision протягом 4 секунд. Пристрій увімкнеться, відобразиться жовте підсвічування, а 3 піктограми вікового діапазону почнуть блимати.


C. Натисніть кнопку Age Precision®. Вибраний віковий діапазон буде блимати. Натискайте кнопку Age Precision, доки на дисплеї не почне блимати бажаний віковий діапазон.

D. Вибравши бажаний віковий діапазон, припиніть натискати кнопку та зачекайте 3 секунди. Засвітиться зелене підсвічування, а вибраний віковий діапазон засвітиться постійним світлом. Через 4 секунди термометр вимкнеться.

E. Бажаний віковий діапазон буде автоматично вибрано, коли термометр увімкнеться. Примітка. З бажаним віковим діапазоном можна вибрати альтернативний віковий діапазон під час кожного використання, натиснувши кнопку Age Precision, коли з'явиться значок вікового діапазону після ввімкнення термометра.




F. Щоб видалити потрібний віковий діапазон, відкрийте кришку батарейного відсіку, вийміть батареї, зачекайте 30 секунд і знову вставте батареї.

ВАЖЛИВО: щоб забезпечити точні показники, ви завжди повинні вимірювати температуру у віковому діапазоні, який відповідає віку людини.

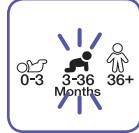

5 Виміряйте температуру

Натисніть кнопку температури. Дисплей відобразить анімацію пунктирною лінією під час зчитування. Після завершення зчитування пролунає звуковий сигнал підтвердження, а на екрані відобразиться відповідний температурний колір.

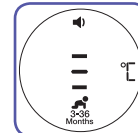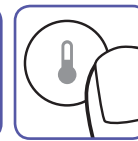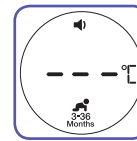


Якщо пристрій розташований надто далеко від чола, він запропонує вам підійти ближче, відобразивши символи «0-2 см». Повільно рухайте пристрій у напрямку до чола, доки не почнеться анімація пунктирною лінією та не відобразяться показники.




6 Зчитайте температуру

Якщо температура знаходиться в межах норми, після завершення вимірювання пролунає довгий звуковий сигнал. Якщо температура знаходиться в діапазоні температури, пролунають десять коротких звукових сигналів, що вказує на завершення вимірювання.

4 Розміщення термометра

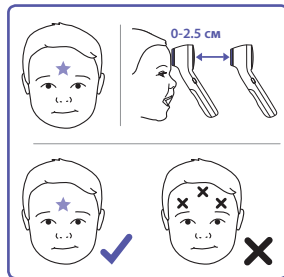Розмістіть термометр на відстані до 2,5 см від центру чола, безпосередньо між бровами. Коли термометр готовий і знаходиться на відстані 2,5 см від чола, на екрані з'явиться горизонтальна лінія риски («---»). Для безконтактного використання жовтий світловий індикатор покаже вам, куди ви націлюєтеся. Якщо область брів покрита волоссям, потім або брудом, попередньо очистіть область, щоб покращити точність зчитування температури. Під час вимірювання важливо тримати градусник і лоб нерухомо. Рух впливає на показання температури.



Віковий діапазон	Зелений нормальна температура	Жовтий Лихоманка	Червоний Висока температура
 0* -3 місяця	≥35.8 – ≤37.4 °C (≥96.4 – ≤99.4 °F)		>37.4 °C (>99.4 °F)
 3-36 місяців	≥35.4 – ≤37.6 °C (≥95.7 – ≤99.6 °F)	>37.6 – ≤38.5 °C (>99.6 – ≤101.3 °F)	>38.5 °C (>101.3 °F)
 36 місяців-дорослий	≥35.4 – ≤37.7 °C (≥95.7 – ≤99.9 °F)	>37.7 – ≤39.4 °C (>99.9 – ≤103.0 °F)	>39.4 °C (>103.0 °F)


* 0 місяців визначається як термін вагітності, що перевищує або дорівнює 37 календарним рокам

7 Щоб вимкнути прилад

Щоб вимкнути пристрій, натисніть кнопку живлення. Пристрій також автоматично вимикається через 30 секунд бездіяльності.

Як використовувати безконтактний термометр для вимірювання температури

1. Зніміть захисний ковпачок

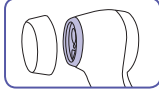


2. Увімкніть живлення

Натисніть і відпустіть кнопку живлення один раз. Увімкнеться підсвічування та розпочнеться послідовний запуск приладу.

ПРИМІТКА. Перед вимірюванням обов'язково зняти захисну кришку сканера.

3. Виберіть режим вимірювання температури їжі та ванни.

Натисніть і відпустіть кнопку режиму вимірювання температури їжі та ванни. Пролунає звуковий сигнал, на дисплеї відобразиться піктограма їжі та ванни, підсвічування екрана стане синім, а на екрані з'являться три риси, що вказує на те, що термометр готовий вимірювати температуру.

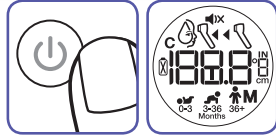


4. Розміщення термометра

Розмістіть пристрій на відстані до 6 см від води або їжі.

Примітка: Вимірюючи температуру їжі або ванни, термометр повинен бути спрямований прямо на їжу або воду у ванній.


-Не наводьте термометр в сторону контейнера, що містить рідину або їжу.

-Не торкайтеся термометром рідини або їжі.

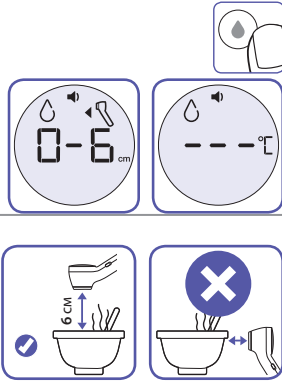


5. Виміряйте температуру

Натисніть кнопку температури (ви можете натиснути й утримувати цю кнопку або натиснути та відпустити її). На дисплеї відобразиться пунктирна лінія під час вимірювання. Після завершення вимірювання на дисплеї з'явиться значення температури.

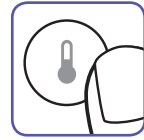



6. Зчитайте температуру

Відведіть прилад від об'єкта та зчитайте температуру

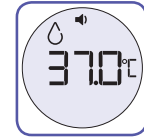


Зміна температурної шкали

1. Відкрийте батарейний відсік і вийміть батареї.
2. Перемикач між °C / °F доступний у батарейному відсіку.
3. Пересуньте перемикач у положення °C або °F, щоб встановити бажану температурну шкалу.
4. Встановіть батареї та закрийте кришку батарейного відсіку.

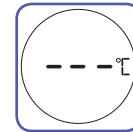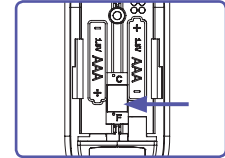


Цельсий

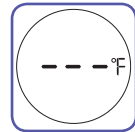

Фаренгейт

Зміна звукового режиму

Термометр Vgaip дозволяє вимкнути звукові сигнали на термометрі, щоб не розбудити сплячу дитину. Щоб увімкнути функцію беззвучного режиму, коснувшись перемикач у положення беззвучного режиму та виміряйте температуру. На екрані з'явиться значок, який вкаже, що термометр знаходиться в беззвучному режимі.

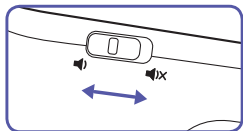

Калібрування

Термометр калібрується під час виготовлення. Якщо цей термометр використовується відповідно до інструкції з використання, періодичне повторне калібрування не потрібно. Якщо в будь-який момент ви сумніваєтесь в точності вимірювань приладу, будь ласка, зв'яжіться з відділом зв'язків із споживачами.

Усунення несправностей

Повідомлення про помилку	Ситуація	Вирішення
	Коли заряду батареї залишається приблизно 20%, на дисплеї блимає символ попередження про низький заряд батареї; однак пристрій може працювати, доки заряд батареї не залишиться на позначці 0%.	Замініть батареї..
	Якщо значок батареї, що постійно горить, є єдиним символом, що відображається на дисплеї, пристрій не може працювати. Акумулятор слід негайно замінити.	Замініть батареї..
	Це повідомлення відображається, коли виміряна температура нижча за 34 °C (93,2 °F) або вища за 43 °C (109,4 °F), або коли кімнатна температура виходить за межі робочого діапазону 15 °C – 40 °C (59 °C). F – 104 °F).	Повторно виміряйте температуру, уважно дотримуючись інструкцій у розділі «Як використовувати термометр».
	Системна помилка – дисплей самоперевірки блимає безперервно і не супроводжується звуковим сигналом готовності та символом готовності.	Якщо помилка не зникає, зачекайте 1 хвилину, поки термометр автоматично вимкнеться, а потім увімкніть знову. Скинть налаштування термометра, вийнявши батареї та вставивши їх назад. Якщо помилка не зникає зверніться до сервісного центру.
	Порожній дисплей. Термометр не має живлення.	Перевірте, чи правильно встановлено батареї. Також перевірте полярність (<+> і <->) батарей. Зверніться в службу підтримки, якщо термометр все ще не працює.

Догляд і очищення приладу

• Використовуйте спиртову серветку або ватний тампон, змочений спиртом (70% ізопропіловим), щоб очистити корпус термометра та вимірвальний щуп. • Слідкуйте за тим, щоб рідина не потрапила всередину термометра. • Ніколи не використовуйте для чищення абразивні засоби для чищення, розчинники або бензол і ніколи не занурюйте інструмент у воду чи інші рідини для чищення. • Зачекайте 10 хвилин після очищення, перш ніж вимірювати температуру. • Обов'язково замініть захисний ковпачок після використання, щоб запобігти подряпинам або пошкодженням термометра. • Ніколи не вставляйте гострі предмети у область сканера чи будь-яку іншу відкриту поверхню термометра.

Заміна батарей

Безконтактний сенсорний термометр поставляється з 2 батарейками типу AAA. • Змініть 2 нові батарейки AAA, коли на РК-екрані з'явиться миготливий символ батарей. • Щоб замінити батареї, відкрийте кришку батарейного відсіку та вийміть батареї. • Змініть батареї, переконавшись, що вони вивірнені належним чином, як зазначено всередині батарейного відсіку. • Вийміть батареї з приладу, якщо він не використовується протягом тривалого періоду часу, щоб уникнути пошкодження термометра внаслідок витоку рідини з батарей.



Щоб захистити навколишнє середовище, утилізуйте використані батареї у відповідних місцях збору відповідно до національних або місцевих норм

Гарантія

Перш ніж використовувати цей пристрій, прочитайте всі інструкції. Будь ласка, збережіть чек як підтвердження дати покупки. Квитанцію необхідно пред'явити під час пред'явлення будь-якої претензії протягом відповідного гарантійного періоду. Будь-які вимоги за гарантією не будуть дійсними без підтвердження покупки.

Гарантія на ваш пристрій становить два роки (2 роки) з дати покупки.

Ця гарантія поширюється на дефекти матеріалів або виготовлення, які виникають за нормального використання; несправні пристрої, які відповідають цим критеріям, будуть замінені безкоштовно.

Гарантія не покриває дефекти чи пошкодження, спричинені неправильним використанням або недотриманням інструкцій користувача. Гарантія втрачає чинність, якщо пристрій було відкрито, пошкоджено чи використано з деталями чи аксесуарами не від бренду Braun, або якщо ремонт виконується неавторизованими особами.

Гарантія не поширюється на аксесуари та витратні матеріали. Щоб отримати запити на підтримку, відвідайте www.hot-europe.com/support або знайдіть контактну інформацію служби підтримки в кінці цього посібника користувача.

Ця гарантія поширюється лише на країни Європи, Росії, Близького Сходу та Африки. Лише для Великобританії: це не впливає на ваші законні права споживача.

LOT і SN вашого пристрою надруковані на таблиці номінальних даних у відсіку для батарей.

Дата виготовлення вказується за номером партії. Перші три цифри представляють юліанську дату виробництва продукту, а наступні дві цифри представляють останні два числа календарного року, коли було виготовлено продукт.

Технічні характеристики

Тип:	Безконтактний+контактний (BNT400)
Діапазон вимірювання:	34 °C – 43 °C (93,2 °F – 109,4 °F)
Роздільна здатність:	0,1 °C (0,1 °F)
Лабораторна точність:	0,2 °C для 35 °C – 42 °C (0,4 °F для 95 °F – 107,6 °F) за межами цього діапазону ±0,3 °C/0,5 °F (температура навколишнього середовища: від 15 °C до 40 °C (від 59 °F до 104 °F) Цей термометр відображає розраховану оцінку усного еквівалента.
Дисплей:	рідкокристалічний дисплей, 4 цифри та спеціальні значки
Акустика:	Аудіо: Нормальний температурний діапазон = Зелений температурний діапазон: 1 довгий звуковий сигнал тривалістю 0,4 секунди. Лихоманка = Червоний або жовтий температурний діапазон: 10 коротких звукових сигналів тривалістю 0,2 секунди
Робоча температура:	15 °C – 40 °C (59 °F – 104 °F)
Автоматичне вимкнення:	прибл. 30 секунд після останнього вимірювання
Вага:	100 гр (з батарейками), 82,5 гр (без батарейок)
Діапазон тривалого зберігання	-25 °C – 55 °C (-13 °F – 131 °F)
Температура зберігання/ транспортування:	
Вологість:	15–95% без конденсації
Батарея:	(2) батареї AAA - мінімум 500 вимірювань
Тиск:	700-1060 гПа (0,7-1,06 атм)

Цей продукт відповідає положенням європейських директив 93/42/EEC (Директива про медичні пристрої) і 2011/65/EU (ROHS).



Прикладні частини типу VF 40



Робоча температура



Дивіться інструкцію з використання

IP22



Захищений від твердих сторонніх предметів діаметром 12,5 мм і більше. Захист від вертикально падаючих крапель води при нахилі пристрою до 15 градусів.

Температура зберігання

Компанія залишає за собою право змінювати зовнішній вигляд приладу без попередження. МЕДИЧНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ потребує особливих запобіжних заходів щодо електромагнітної сумісності. Щоб отримати детальний опис вимог щодо електромагнітної сумісності, зверніться до місцевого авторизованого сервісного центру (див. гарантійний талон). Портативне та мобільне радіочастотне обладнання зв'язку може впливати на МЕДИЧНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ.



Цей продукт містить батареї та електронні відходи, що підлягають переробці. Щоб захистити навколишнє середовище, не викидайте його разом із побутовими відходами.